

SEDIA PORTANTINA

REF SED001 2 ruote

REF SED004 4 ruote

1. Avvertenze generali

- Per un utilizzo corretto del dispositivo fare riferimento al presente manuale
- Il prodotto deve essere utilizzato esclusivamente da personale qualificato
- Verificare che il prodotto vi sia consegnato integro e mantenerlo imballato lontano da fonti di calore
- La vita utile del dispositivo è determinata dall'usura di parti non riparabili e/o sostituibili
- Conservare in luoghi asciutti
- Prestare sempre attenzione alla presenza di bambini

2. Prima di ogni uso

- Verificare sempre lo stato di usura delle parti in modo tale da garantire un utilizzo del dispositivo in totale sicurezza per persone e cose

3. Avvertenze per l'utilizzo

- Usare le cintura di sicurezza quando necessario
- Verificare periodicamente la stabilità e robustezza del prodotto. Sostituirla immediatamente in presenza di rotture.
- Non utilizzare con pazienti il cui peso supera quanto indicato
- In caso di dubbi sull'utilizzo e sulla manutenzione del prodotto, contattare il rivenditore
- Per evitare eventuali rischi tenere il dispositivo lontano dalla portata dei bambini.
- E' necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi relativamente al DM fornito da PVS SPA al Fabbricante e all'autorità competenti

4. Istruzioni

- Aprire la sedia (SED001 con 2 ruote – SED004 con 4 ruote)
- Spostare correttamente il paziente sulla sedia (SED001 con 2 ruote – SED004 con 4 ruote)
- Utilizzare le apposite cinture per mettere in sicurezza il paziente
- La presenza di maniglie permette di sollevare il paziente afferrando la sedia da più lati (SED001 con 2 ruote – SED004 con 4 ruote) .
- Portata massima della sedia (SED001 con 2 ruote – SED004 con 4 ruote) e di 150 Kg.

5. Dimensioni (SED001 con 2 ruote – SED004 con 4 ruote)

- Sedia aperta : 910mm(h) x 520mm (l) x 710 mm (d)
- Sedia chiusa : 910mm(H) x 520mm (l) x 195 mm (d)
- Peso : 8,5 Kg

6. Manutenzione

I dispositivi al momento dell'immissione in commercio sono controllati accuratamente, in caso

di riparazione devono essere utilizzati soltanto ricambi ed accessori originali.

7. Pulizia e disinfezione

Utilizzare acqua e un disinfettante non aggressivo; asciugare lontano da luce diretta del sole.

Evitare assolutamente di utilizzare prodotti acidi, alcalini o solventi come ad esempio l'acetone

o il diluente.

8. Condizioni di smaltimento

In caso di smaltimento del dispositivo non usare mai i normali sistemi di conferimento dei rifiuti

solidi urbani. Si raccomanda invece di smaltire il dispositivo attraverso le comuni isole ecologiche comunali per le previste operazioni di riciclo dei materiali utilizzati.

9. Garanzia

Il prodotto ha una garanzia di 24 mesi contro i difetti di produzione.

Si Dichiara che il dispositivo è conforme a MDR 745/2017 "Dispositivi Medici"



PVS SPA

VIA LEONARDO DA VINCI 18 20051 CASSINA DE PECCHI (MI) ITALY