

# NEOSPLINT

## DESCRIZIONE

Le SplintArt sono splint semplici e pratiche, create per immobilizzare gli arti. Il set comprende una gamma di steccobende completa per il trattamento di arti slogati o fratturati, le quali possono essere modellate secondo le necessità ed una volta applicate secondo le esigenze del caso, offrono una straordinaria rigidità. Data la leggerezza e l'adattabilità il set completo o i singoli pezzi si possono portare ovunque in quanto occupano pochissimo spazio. Inoltre, essendo realizzate in neoprene, mantengono la temperatura corporea.

## COMPOSIZIONE

Struttura SplintArt in neoprene accoppiato con MTP D90 e cotone jersey nero  
Anima rigida di alluminio modellabile a freddo  
Chiusura e regolazione in velcro blu e arancio



## DESTINAZIONE D'USO

Arti slogati  
Arti fratturati

CODICE	MISURA	Codice R.D.M.	Codice C.N.D.
1001	Gamba	2370642	M030599
1002	Braccio	2370644	M030599
1003	Gomito-Caviglia	2370646	M030599
1004	Avambraccio	2370649	M030599
1005	Polso	2370653	M030599
1020	Set Completo (borsa + 1 pezzo per misura)	2370655	M030599

## MODALITA' DI APPLICAZIONE

1. Appoggiare l'arto lesionato sullo SplintArt
  2. Modellare l'anima in metallo come si desidera
  3. Regolare e chiudere attraverso i velcri (il velcro di colore arancio indica la parte superiore)
- (Per riportare la SplintArt in posizione retta raddrizzare l'anima in metallo con le mani)

## INDICAZIONI

Situazioni post-traumatiche o post-operatorie degli arti nelle quali sia necessario un valido sostegno e/o protezione dell'apparato scheletrico e dei fasci muscolari.

In caso di utilizzo dei dispositivi in presenza di lesioni della cute, proteggere la lesione con adeguata fasciatura; in tali situazioni non utilizzare il dispositivo a contatto diretto con la lesione.

Prodotto sanitario da applicare sotto controllo medico.

Radiotrasparente – Latex Free – Non sterile - Monopaziente.

## CONTROINDICAZIONI / AVVERTENZE

Disturbi al sistema venoso, arterioso o linfatico. In caso di sospetta patologia in atto, consultare il proprio medico prima dell'uso. In ogni caso utilizzare per periodi prolungati nel tempo solo sotto controllo medico.

## CONSERVAZIONE

Conservare in luogo asciutto, lontano dai raggi solari, fonti di calore e polvere.

Il prodotto non ha scadenza, ma la durata prevista è di anni 10 per i materiali e i componenti del dispositivo.

## LAVAGGIO

- Lavare a mano in acqua a 30°C con sapone o detersivo neutri
- Sciacquare bene
- Non strizzare
- Lasciare asciugare orizzontalmente
- Non stirare

## CONFEZIONAMENTO

Primario: Pezzi 1 in sacchetto in PVC

Secondario: box pezzi 5

## CONFORMITA' DEL PRODOTTO/NORME DI RIFERIMENTO

Direttiva 93/42/CE

Dispositivo Medico di Classe I

ISO 9001:2008

## PRODUTTORE

Artsanity S.r.l. – Via della Borsa, 18 – 31033 Castelfranco Veneto (TV) – ITALY



PVS SPA  
via Leonardo da Vinci, 18  
20051 Cassina de Pecchi MI IT  
tel 02 9160011 fax 0291600149 mail info@pvs-spa.it

