

SCHEDA TECNICA CER219

CEROTTO PROTEZIONE SALVAPELLE

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Protezione in schiuma di poliuretano per la pelle.
Il prodotto è un dispositivo medico appartenente alla classe I secondo la Regola 1 dell'Allegato IX della direttiva 93/42/CEE e ss.mm.ii. (D.Lgs. 46 del 24/02/97 e ss.mm.ii.).

MARCATURA CE

L'applicazione della marcatura CE sul prodotto ricade sotto la responsabilità del fabbricante che deve provvedere a compilare un Fascicolo Tecnico che contenga le informazioni richieste dalla suddetta direttiva (allegato VII) e una Dichiarazione di Conformità e a notificare al Ministero della Salute l'immissione in commercio di tale dispositivo.

CODICI CND/GMDN

CND: M03030202
GMDN: ND

ARTICOLI DISPONIBILI E RELATIVI CODICI AZIENDALI

Articolo	Formato (cm)	Codice
1 pz m 27 x 7 cm	2700x7	CER219

DESTINAZIONE D'USO

Protezione della cute in caso di taping, bendaggi compressivi adesivi, fasciature di sostegno.

INFORMAZIONI PER USO, CONSERVAZIONE, TRASPORTO E SMALTIMENTO

Istruzioni d'uso

Applicare su pelle pulita e asciutta. Applicare sulla parte di cute che deve essere protetta dal bendaggio.

Avvertenze/controindicazioni

Il prodotto è monouso.

Non utilizzare direttamente sulla ferita.

Se utilizzato come specificato, non si conoscono controindicazioni o effetti secondari.

Conservazione/immagazzinamento

Conservare in luogo asciutto e lontano da fonti di calore diretto.

Conservare a temperatura ambiente.

Trasporto

Non trasportare su mezzi scoperti.

Smaltimento

Smaltire secondo la legislazione vigente.

CARATTERISTICHE

Materiali componenti

- Schiuma 100% poliuretano
- Rocchetto di cartone

Sterilità

Non sterile.

Permeabilità aria/vapore

Permeabile.

Scadenza

5 anni (dal mese di produzione, in confezionamento integro e correttamente conservato)

CONFEZIONAMENTO

Confezionamento primario: astuccio di cartoncino patinato.

Confezionamento secondario: non applicato.

Imballaggio finale per la spedizione: scatola di cartone ondulato.

FABBRICANTE

PIETRASANTA PHARMA S.p.A.

Sede legale

Via S. Francesco, 67

55049 VIAREGGIO (LU)

Stabilimento di produzione

Via delle Cannelle, 225

Loc. S. Rocchino

55054 MASSAROSA (LU)